

Ascensor acuático: METALU S-400

Asistente a batería para acceso a piscinas.

Diseñado para piscinas contruidas a ras del suelo.




METALU
ascensoracuatico.com

5
años
GARANTÍA

En todo el repuesto

Colocación del elevador.

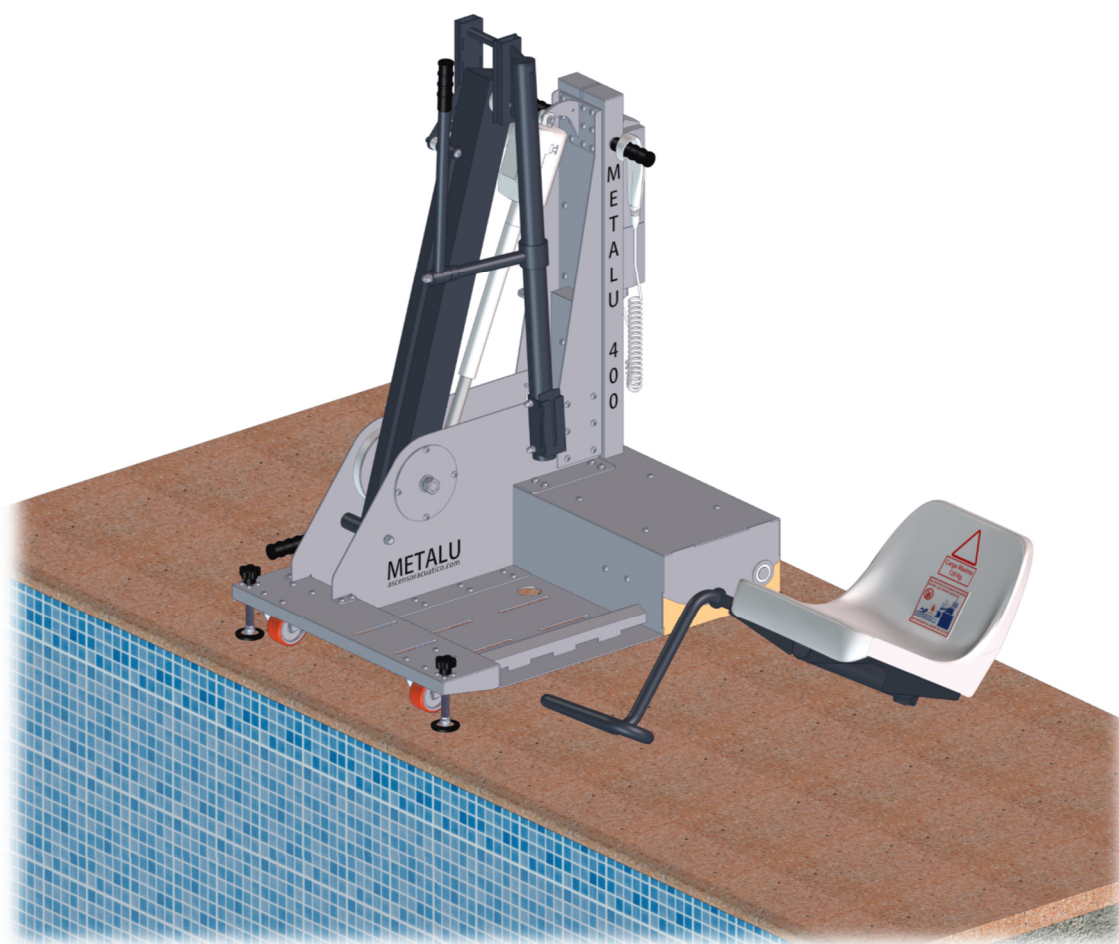

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification






Índice

1. Colocación del elevador.....	3
---------------------------------	---


1. Colocación del elevador.

Colocar el elevador METALU S-400 es muy sencillo, sin ser necesario hacer uso de herramientas externas. Para colocar correctamente el elevador seguir los siguientes puntos (se deberá tener en consideración la normativa impuesta por cada comunidad autónoma).


1. **Desplazar el cuerpo del elevador** hasta el lugar de colocación. Antes de desplazarlo asegurarse de que los apoyos delanteros (husillos) están totalmente subidos. Para facilitar su transporte, se recomienda desplazarlo sin colocar la silla.
2. **Posicionar el elevador** en el del lugar de uso, entre 50 mm y 120 mm del borde de la piscina, sin dejar los apoyos delanteros en el vuelo de la piedra de coronación. Asegurarse que la profundidad en esa zona de la piscina es como mínimo de 0,9 m.

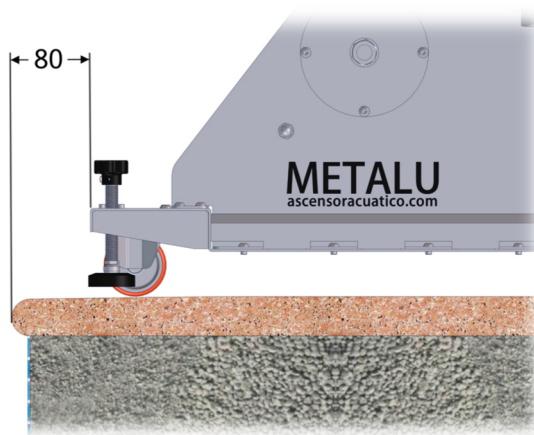


3. Colocar la **barra de seguridad verticalmente** de forma que **descanse en el alojamiento de bisagra** del que dispone para que accione el micro interruptor del sistema eléctrico. Los apoyos traseros quedarán por debajo del nivel de las ruedas traseras, dejándolas suspendidas en el aire.

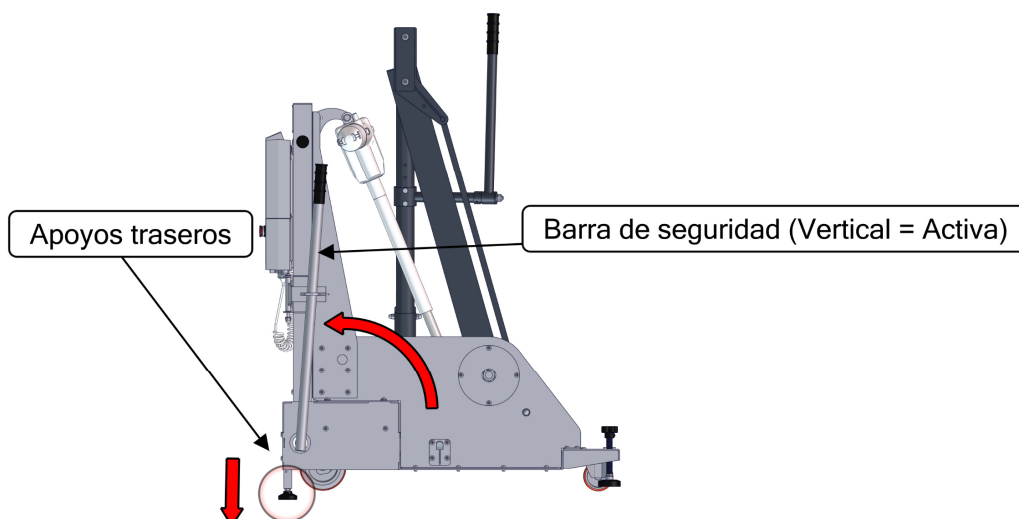

4. **Bajar los apoyos delanteros** quedando estos por debajo del nivel de las ruedas delanteras, dejándolas suspendidas en el aire.

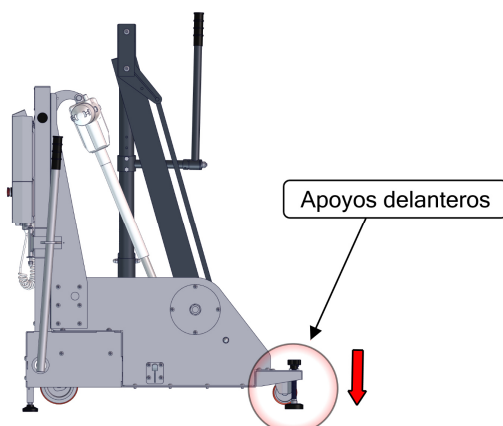

5. **Colocar la silla** en el porta-sillas.

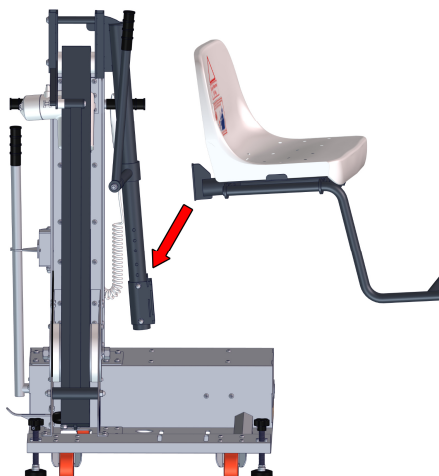

El elevador listo para su uso quedará como en la siguiente imagen:



MANUFACTURAS METÁLICAS LUISIANERAS, S.L.

Ascensor acuático a batería modelo METALU S-400

Colocación del elevador.

Dirección: Polígono Industrial Los Motillos, C/ Madrid n.º 11 naves A, C, D, G, H, 41430.

Localidad: La Luisiana (Sevilla).

CIF: B – 41834508

Teléfono principal: +34 955 907 784

Página web: www.ascensoracuatico.com

Correo electrónico: info@ascensoracuatico.com

Contactos para consultas técnicas:

- Teléfono: +34 613 165 661
- Correo: soporte1@ascensoracuatico.com

